



Mask


Nasal Pillows Interface (P2H)

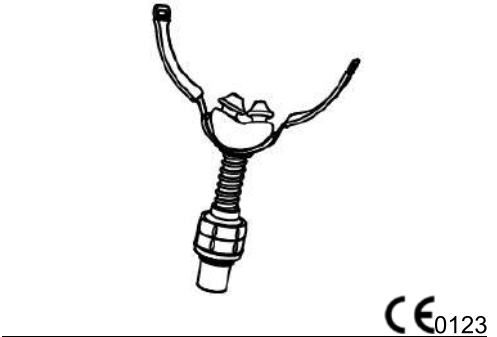


I

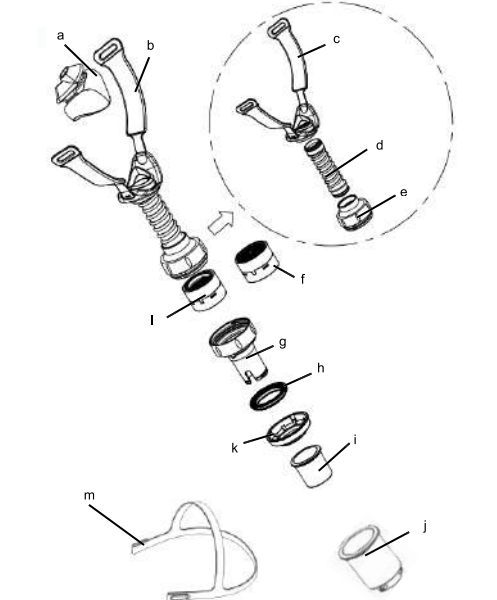


II

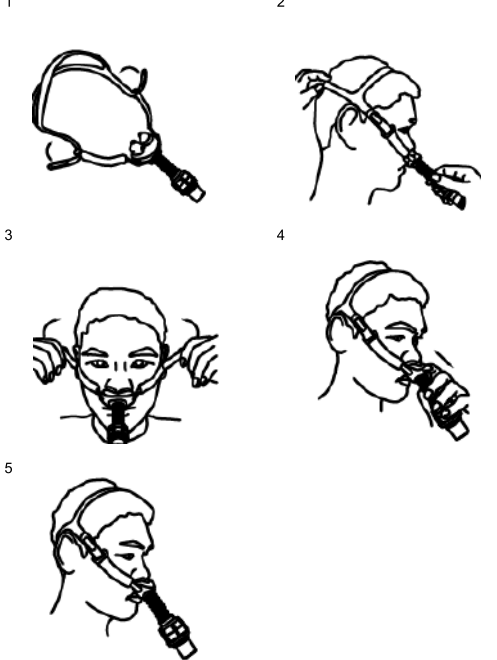

III

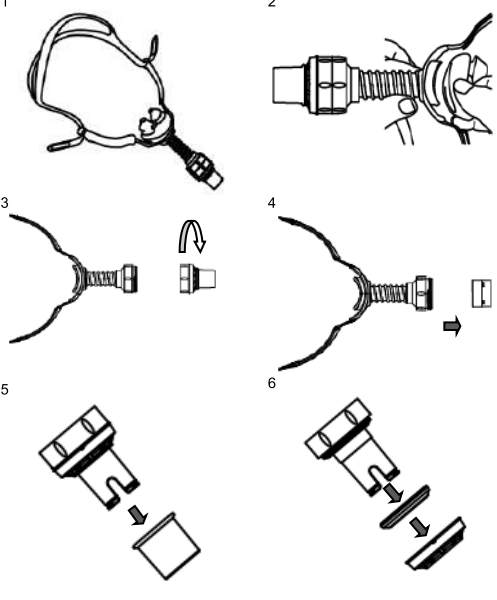

IV

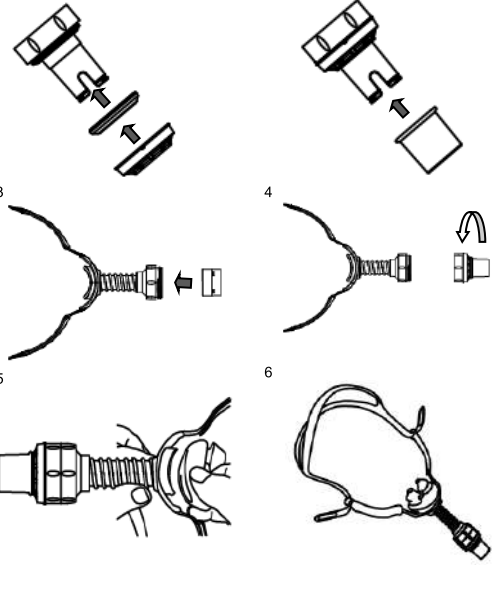

1

Mask

Nasal Pillows Interface (P2H)

Bedienungsanleitung

CE0123

Nasal Pillows Interface (P2H)

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nasal Pillows Interface (P2H) von BMC entschieden haben. Die Nasenpolstermaske ist leicht, elastisch und leise. Sie wurde speziell dafür entwickelt, die Therapie für Sie durch möglichst wenige Berührungspunkte mit Ihrem Gesicht so angenehm wie möglich zu gestalten. Dieses Benutzerhandbuch versorgt Sie mit den notwendigen Informationen zur korrekten Verwendung Ihrer Maske. Die Schnittstelle enthält keinen Naturkautschuklatex.

Verwendungszweck / Indikation

Die Nasal Pillows Interface (P2H) leitet den Luftstrom nicht invasiv zu einem Patienten von einem positiven Luftdruckgerät wie einem kontinuierlichen positiven Luftdruck (CPAP) oder einem Bi-Level-System. Die Nasal Pillows Interface (P2H) ist:

- angewendet bei erwachsenen Patienten (> 66 lb / 30 kg), bei denen ein positiver Atemwegsdruck verordnet wurde.
- bestimmt für die Wiederverwendung bei einem Patienten im Wohnumfeld und für die Wiederverwendung bei unterschiedlichen Patienten im Krankenhaus oder im institutionellen Umfeld.

VORSICHT: In den USA beschränkt das Bundesgesetz den Verkauf dieses Geräts auf den Verkauf durch oder auf Anordnung eines Arztes.

Kontraindikationen

Bei den folgenden Symptomen darf die Schnittstelle nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden:

- Gesichtsdeformitäten.
- Verletzter Gesichtshaut im Kontaktbereich der Schnittstelle.

Vor der Verwendung der Schnittstelle

! WARNUNGEN

- Die Schnittstelle sollte ausschließlich mit einem von Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlenen Atemtherapiegerät (CPAP oder Bilevel) verwendet werden. Sie darf erst dann getragen werden, wenn das Atemtherapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Die Atmungsöffnung muss sauber gehalten werden.
- Erläuterung des Warnhinweises:** Atemtherapiegeräte sind zur Verwendung mit speziellen Schnittstelle, mit Anschlüssen mit Luftaustlassöffnungen (auf dem Winkelstück) oder Ausatemventilen vorgesehen, die für einen gleichmäßigen Luftaustritt aus der Schnittstelle sorgen. Wenn das Therapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, drückt die frisch vom Atemtherapiegerät zugeführte Luft die ausgeatmete Luft durch die angeschlossene Ausatemöffnung aus der Schnittstelle heraus. Wenn das Atemtherapiegerät jedoch nicht richtig funktioniert (z. B. Stromausfall), dann fließt nicht ausreichend Frischluft durch die Schnittstelle und die ausgeatmete Luft wird unter Umständen erneut eingeatmet. Nehmen Sie die Nasal Pillows Interface (P2H) in diesem Fall sofort ab.
- Nicht anwendbar für Benutzer mit Silikonallergie.
- Die Flussrate der ausgeatmeten Luft ist bei niedrigem Schnittstelle-**druck** geringer (siehe Abschnitt "Technische Spezifikationen" für detaillierte Angaben zu Druck-Fluss-Kurven). Wenn der Ausatmungsdruck in der Schnittstelle zu gering ist, wird unter Umständen nicht die gesamte ausgeatmete Luft vor dem nächsten Atemzug aus den Schläuchen gedrückt.
- Stop using the P2H if your nose is frequently irritated and consult your doctor.
- Bei der Verwendung von Sauerstoff mit dem Atemtherapiegerät, muss die Sauerstoffzufuhr ausgeschaltet sein, wenn das Atemtherapiegerät nicht in Betrieb ist. Erläuterung des Warnhinweises: Wenn das Therapiegerät nicht in Betrieb ist und die Sauerstoffzufuhr eingeschaltet ist, kann sich der Sauerstoff, der in das Schlauchsystem geleitet wird, im Inneren des Flussgeneratorgehäuses ansammeln. Die Ansammlung von Sauerstoff im Gehäuse des Therapiegeräts führt zu Brandgefahr. Dieser Warnhinweis gilt für die meisten Arten von Atemtherapiegeräten. Bitte bei Verwendung von Sauerstoff nicht rauchen.
- Bitte verlassen Sie das Rauchen während der Verwendung von Sauerstoff.
- Die hier gezeigten Bilder sind nur Richtwerte. Wenn es eine Inkonsistenz zwischen dem Bild und dem tatsächlichen Produkt gibt, gilt das tatsächliche Produkt.

Schnittstellekomponenten (I)

a. Nasenpolster (verfügbar in S, M, L)	b. Rahmenbaugruppe
c. Rahmen	d. Kurze Röhre
e. Befeuchterabdeckung	f. Befeuchter (HU-Plus)
g. Befeuchterkörper	h. Filter
i. Drehgelenk	j. Clip-Anschluss (optionales Zubehör)
k. Filterkappe	l. Befeuchter (HU)
m. Kopfband	

Hinweis: HU und HU-Plus sind wasserlose Befeuchter. Sie sind so konzipiert, dass sie mehr Komfort bieten, indem sie die Luftfeuchtigkeit verbessern und eine Entlastung bei möglicher Trockenheit bieten. HU ist ein guter Ausgangspunkt, um den richtigen Befeuchtungsgrad zu finden. HU-Plus wird die Luftfeuchtigkeit weiter erhöhen, was nützlich ist, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung sehr niedrig ist (z. B. in großen Höhen im Flugzeug).

Anlegen und Anpassen der Schnittstelle (II)

Hinweis:

- Drehen Sie den Befeuchtungskörper, bis er sich öffnet, bevor Sie das Interface aufsetzen. Trennen Sie den Befeuchtungskörper von der Befeuchterabdeckung, wie in Abschnitt 3 der "Demontage der Schnittstelle" beschrieben. Dann siehe Abschnitt "Zusammensetzen der Schnittstelle" 3, 4 installieren Sie den Befeuchter (HU/HU-Plus) auf den Befeuchterdeckel montieren und ziehen Sie den Befeuchtungskörper an. Befolgen Sie nach dem Einbau des Befeuchters (HU/HU-Plus) die nachstehenden Schritte zum Tragen.**
- Bevor Sie die Schnittstelle wieder tragen, lesen Sie bitte die Abschnitte "Reinigung der Schnittstelle zu Hause" und "Wiederaufbereitung der Schnittstelle bei Patientenwechsel" für die Reinigung und Desinfektion.**
- Die Nasenpolster sind in drei verschiedenen Größen verfügbar (S, M, L). Halten Sie die Polster an Ihre Nasenlöcher, um sicherzugehen, dass Ihnen die Polstergröße (z. B. M) richtig passt.**
- Wenn Sie austretende Luft bemerken, passen Sie den Winkel der Nasenpolster an, um eine bessere Abdichtung zu erzielen. Wenn Sie diese Luft-Lecks nicht beheben können, benötigen Sie unter Umständen eine andere Nasenpolstergröße.**

- Ziehen Sie die beiden seitlichen Riemen des Kopfbands einzeln durch die Schlitze in den Halterungen und falten Sie die Riemen dann zur Befestigung nach hinten.
- Legen Sie das Kopfband an, indem Sie den hinteren Riemen festhalten und ihn über Ihren Hinterkopf ziehen. Der obere Riemen sollte bequem oben auf Ihrem Kopf sitzen.
- Ziehen Sie gleichmäßig an den beiden seitlichen Riemen, bis die Schnittstelle bequem direkt unter Ihrer Nase sitzt.

1

- Befestigen Sie die Riemen erneut.
- Ziehen Sie die Schnittstelle von Ihrem Gesicht weg und positionieren Sie sie dann so, dass sie angenehm sitzt. Vergewissern Sie sich, dass die Nasenpolster genau in Ihre Nasenlöcher passen und sich beide Polster in einer aufrechten Position befinden.
- Verbinden Sie schließlich das Ende des Schnittstelleschlauchs mit dem Luftschlauch des Gerätes. Ihre Schnittstelle ist nun richtig angepasst und einsatzbereit.

Demontage der Schnittstelle (III)

Hinweis:

- Die Rahmenbaugruppe kann nicht zerlegt werden.
- Ziehen Sie nicht am Verbindungsschlauch oder der Schlauchleitung des Flussgenerators, da dies zu Schäden führen könnte.

- Lösen und entfernen Sie das Kopfband aus der Öffnung im Rahmen.
- Entfernen Sie die Nasenpolster von der Rahmenbaugruppe.
- Halten Sie die Befeuchterabdeckung und drehen Sie den Befeuchtungskörper von der Befeuchterabdeckung.
- Nehmen Sie den Befeuchter (HU/HU-Plus) von der Befeuchterabdeckung ab.
- Entfernen Sie den Drehgelenk vom Befeuchterkörper.
- Entfernen Sie den Filterdeckel vom Befeuchterkörper und den Filter vom Deckel.

Austausch von Befeuchter (HU/HU-Plus) und Filter

- Drehen Sie den Befeuchtungskörper, bis er geöffnet ist, entfernen Sie den Befeuchter (HU/HU-Plus) und installieren Sie den neuen Befeuchter (HU/HU-Plus) in der Befeuchterabdeckung und ziehen Sie den Befeuchtungskörper auf die Befeuchterabdeckung an. Siehe die Abschnitte "Demontage der Schnittstelle" und "Zusammensetzen der Schnittstelle".
- Öffnen Sie die Filterkappe und entfernen Sie den Filter von der Filterkappe. Den neuen Filter in den Filterdeckel einbauen und befestigen. Siehe die Abschnitte "Entfernung der Schnittstelle" und "Zusammensetzen der Schnittstelle".

! Achtung

- Der Befeuchter (HU/HU-Plus) kann nicht gereinigt oder von mehreren Personen wiederverwendet werden und muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Öffnen des Befeuchter (HU/HU-Plus) pakets ausgetauscht werden.
- Der Filter kann nicht von mehreren Personen wiederverwendet werden.
- Es ist normal, dass der Filter nach der Verwendung kleine schwarze Flecken aufweist. Der Filter sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden, um zu vermeiden, dass er durch Staub blockiert wird, um den Luftaustritt zu beeinträchtigen. Der Filter sollte nach Gebrauch innerhalb von 30 Tagen oder nach mehr als 8-maliger Reinigung ersetzt werden.
- Bitte reiben Sie den Filter während der Reinigung 3-5 Mal sanft in warmem Wasser ein. Reiben Sie den Filter nicht gewaltsam oder willkürlich, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Reinigung der Schnittstelle zu Hause

Anmerkungen:

- Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Schnittstelle reinigen.
- Waschen Sie die Kopfbedeckung vor dem ersten Gebrauch, um eventuelle Farbstoffe zu entfernen.
- Schnittstelle und Kopfband sind immer per Hand zu reinigen.
- Beim Reinigen der Schnittstelle kann, Kurze Röhre, Befeuchterabdeckung und der Rahmen nicht aus der Rahmenbaugruppe entfernt werden.
- Waschen Sie den Befeuchter (HU/HU-Plus) nicht.

! VORSICHT

- Befolgen Sie stets die Reinigungsanweisungen und verwenden Sie keine Lösungen, die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aromen, Feuchtigkeitscremes, antibakterielle Mittel oder Duftöle enthalten, um die Teile des Systems oder der Luftschläuche zu reinigen. Andernfalls kann die Schnittstelle beschädigt werden.
- Wenn Teile des Systems oder der Schläuche direkt der Sonnenstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden, kann dies zu Schäden führen.
- Wenn sichtbare Schäden an einer Komponente auftreten (z.B. Risse), muss die Komponente entsorgt und ersetzt werden.

Täglich, nach jeder Nutzung

- Demontieren Sie die Schnittstellekomponenten gemäß den Demontageanweisungen.
- Reinigen Sie die einzelnen Schnittstellekomponenten (ausgenommen das Kopfband, Filter) gründlich, indem Sie sie vorsichtig in warmem Wasser (ca. 30°C) mit einem milden Flüssigwaschmittel (z.B. Alconox, 1% verdünnt) für bis zu 10 Minuten spülen.
- Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um die Entlüftung zu reinigen.
- Spülen Sie alle Komponenten gut mit Trinkwasser aus und lassen Sie sie an der Luft, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung trocknen.
- Wenn alle Komponenten trocken sind, bauen Sie sie gemäß den Anweisungen wieder zusammen.

Wöchentlich

Waschen Sie das Kopfband, der Filter und alle Komponenten von Hand in warmem (ca. 30°C) Wasser mit einem milden Flüssigwaschmittel (z.B. Alconox, 1% verdünnt) für bis zu 10 Minuten. Spülen Sie die Komponenten gut aus und lassen Sie sie an der Luft, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung trocknen.

Wiederaufbereitung der Schnittstelle bei Patientenwechsel


Diese Schnittstelle sollte bei jedem Patientenwechsel erneut aufbereitet werden. Die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie in der beiliegenden "Reinigungs- und Desinfektionsanleitung" oder auf der BMC-Website www.bmc-medical.com. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BMC-Vertreter. Um Kreuzinfektionen zu verhindern, müssen Filter und Befeuchter (HU/HU-Plus) ausgetauscht werden, wenn die Schnittstelle von mehreren Patienten verwendet wird.

Zusammensetzen der Schnittstelle (IV)

- Legen Sie den Filter in die Filterabdeckung und setzen Sie die Filterabdeckung in den Befeuchterkörper. Achten Sie darauf, dass die Filterabdeckung befestigt ist.
- Installieren Sie das Drehgelenk am Befeuchterkörper und vergewissern Sie sich, dass es zuverlässig ist. Anmerkungen: Wenn der Clip-Anschluss mit dem Befeuchtungskörper verbunden ist, müssen die halbkreisförmige Markierung auf dem Clip-Anschluss und die U-förmige Kerbe der Filterabdeckung des Befeuchtungskörpers ausgerichtet sein, bevor er angeschlossen werden kann.
- Der Befeuchter (HU/HU-Plus) wird in die Befeuchterabdeckung geladen.
- Halten Sie die Befeuchterabdeckung, drehen Sie den Befeuchtungskörper und ziehen Sie den Befeuchtungskörper an die Befeuchterabdeckung an.
- Installieren Sie die Nasenpolster auf der Rahmenbaugruppe und vergewissern Sie sich, dass die Nasenpolster zuverlässig sitzt.
- Bringen Sie das Kopfband der an der oberen Montageöffnung der Rahmenbaugruppe an.

2

Technische Spezifikationen

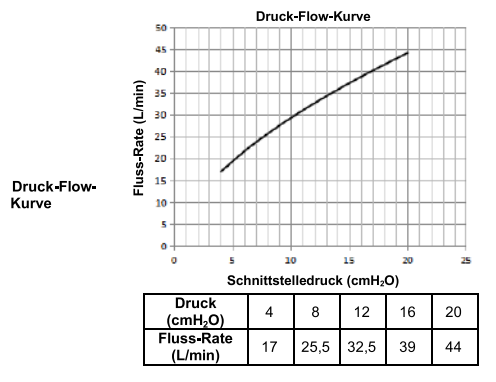

Totraum Information	Totraum ist das leere Volumen der Nasenpolster- und Verbindungsschlauchinheit bis zum Drehgelenk. Der Totraum der P2H für große Polster liegt bei 45 ml.
Therapie Druck	4 bis 20 cmH ₂ O.
Widerstand	Druckabfall gemessen (Durchschnitt für 3 Größen) bei 50 L/min: Befeuchter (HU-Plus) : 0,8 cmH ₂ O Befeuchter (HU) : 0,5 cmH ₂ O bei 100 L/min: Befeuchter (HU-Plus) : 2,2 cmH ₂ O Befeuchter (HU) : 1,3 cmH ₂ O
Geräuschpegel	GERÄUSCHEMISSIONSWERTE gemäß ISO 4871. Der A gewichtete Pegel liegt bei: 28 dBA, (5 dBA Unsicherheitsfaktor). Der A gewichtete Pegel bei 1 m Entfernung liegt bei: 20 dBA (6 dBA Unsicherheitsfaktor).
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur für den Betrieb: +5°C bis +40°C (41°F bis 104°F) Luftfeuchtigkeit für den Betrieb: 0% ~ 93% relative Feuchtigkeit nicht-Kondensierend Lager und Transport: -20°C bis +55°C Lager und Transport: Feuchtigkeit: 0% ~ 93% relative Feuchtigkeit (ohne Kondensation)

Lagerung

Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle gründlich gereinigt wurde, bevor diese für einen beliebigen Zeitraum gelagert wird. Die Schnittstelle an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Entsorgung

Die Nasal Pillows Interface (P2H) enthält keine gefährlichen Stoffe und kann mit Ihrem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Zeichen

System und Verpackung

	Achtung, Begleiddokumente beachten. Weist auf eine Warnung oder einen Warnhinweis hin und weist Sie auf eine mögliche Verletzung hin oder erläutert spezielle Maßnahmen für den sicheren und effektiven Gebrauch der Einrichtung.
	Chargencode
	Katalognummer
	Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt
	Temperaturbegrenzung
	Feuchtigkeitsbegrenzung
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Eingeschränkte Garantie

Es wird gewährleistet, dass die Nasal Pillows Interface (P2H), einschließlich ihrer Komponenten, Rahmenbaugruppe, Polsterbaugruppe, Drehgelenk, Clip-Anschluss, Befeuchterkörper, Befeuchter (HU/HU-Plus), Filter, Filterkappe und sonstigem Zubehör für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum durch den Erstkunden frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der Luftbefeuchter (HU/HU-Plus) und der Filter müssen für einen Zeitraum von dreißig (30) Tagen ab Kaufdatum durch den Erstverbraucher frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein. Um die Rechte im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, kontaktieren Sie die lokalen autorisierten Händler. Die erwartete Lebensdauer der Nasal Pillows Interface (P2H) liegt bei einem Jahr. Und die erwartete Lebensdauer des Luftbefeuchters (HU/HU-Plus) und des Filters beträgt 30 Tage.

HERSTELLER:
BMC MEDICAL CO., LTD.
Room 110 Turn A FengyuBuilding, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, Volksrepublik China
URL: en.bmc-medical.com
E-mail: intl@bmc-medical.com
Tel: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

BEVOLLMÄCHTIGTER EU VERTRETER:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726
Fertigungsstätte:
BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.
2/F North Area and 3/F, Gebäude Nr. 4, Nr. 1 Xinxing Road, Wujing District, (301700) Tianjin, P. R. China
Tel: +86-22-82939881

Mask

Nasal Pillows Interface (P2H)

Manuale Utente

CE0123

Nasal Pillows Interface (P2H)

Grazie per aver scelto la Nasal Pillows Interface (P2H) di BMC. La interfaccia nasal pillows è leggera, morbida e silenziosa. È studiata per ridurre al minimo il contatto con il viso, per garantire comodità durante la terapia. Per far valere i diritti risultanti dalla presente garanzia contattare i rivenditori locali autorizzati. La interfaccia non presenta lattice in gomma naturale.

Destinazione d'uso

La Nasal Pillows Interface (P2H) canalizza il flusso d'aria in modo non invasivo da un dispositivo a pressione positiva alle vie aeree superiori del paziente. I dispositivi che possono essere utilizzati sono a pressione positiva continua (CPAP) o pressione positiva a due livelli (bilevel). La Nasal Pillows Interface (P2H):

- Viene utilizzata su pazienti adulti (> 66 lb / 30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia ventilatoria a pressione positiva.
- È destinata al riutilizzo per un singolo paziente in ambiente domestico e per più pazienti in ambiente ospedaliero.

ATTENZIONE: Negli USA, La legge limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione di un medico.

Controindicazioni

Questa interfaccia deve essere usata con cautela in caso di pazienti con le condizioni seguenti:

- Deformità facciale.
- Cute della faccia lesionata a contatto con la interfaccia durante l'utilizzo.

Prima dell'uso Interfaccia

! AVVISI

- La interfaccia deve essere utilizzata esclusivamente con un compressore (CPAP o intermittente) raccomandato dal proprio medico o terapeuta della respirazione. Non deve essere utilizzata prima di aver acceso il compressore e averne verificato il corretto funzionamento. I fori di ventilazione e il filtro devono essere mantenuti liberi.
- Spiegazione dell'avvertenza:** I compressori sono progettati per l'utilizzo con interfacce speciali dotate di connettori aventi aperture di sfogo (situate sul gomito) oppure dispositivi di esalazione separati che consentano la fuoriuscita continua di aria dall'interfaccia. Quando il compressore è acceso e funziona correttamente, l'aria fresca proveniente dal generatore spinge fuori dall'apertura di esalazione collegata l'aria espirata. Quando invece il compressore non è attivo (ad es. in caso di interruzione di corrente), nella interfaccia non viene fornita aria fresca in quantità sufficiente e l'aria espulsa potrebbe essere aspirata di nuovo. In tale circostanza, rimuovere immediatamente P2H.
- Non applicabile per gli utenti di allergia al silicone.
- Il flusso di scarico è più basso se i valori di pressione della interfaccia sono più bassi (vedere la sezione "Specifiche tecniche" per i dettagli sulla Curva Pressione-Flusso). Se la pressione della interfaccia durante l'ispirazione è troppo bassa, potrebbe non essere presente un flusso di scarico sufficiente per far fuoriuscire completamente l'aria espirata prima dell'inizio dell'ispirazione successiva.
- Sospendere l'utilizzo di P2H in caso di frequenti episodi di irritazione nasale, e consultare il medico.
- Qualora il compressore sia utilizzato con ossigeno, il flusso di ossigeno deve essere disattivato ogni volta che il compressore è spento. Spiegazione dell'avvertenza: Quando il generatore di flusso è spento, e il flusso di ossigeno è attivo, l'ossigeno erogato nel tubo del ventilatore potrebbe accumularsi all'interno del generatore di flusso. L'ossigeno accumulato nel compressore comporta un rischio di incendio. Questa avvertenza è valida per la maggior parte dei generatori di flusso.
- Si raccomanda di non fumare durante l'utilizzo di ossigeno.
- Le immagini mostrate qui sono solo indicative. In caso di incoerenza tra l'immagine e il prodotto reale, il prodotto reale sarà soggetto a regolamentazione.

Componenti di interfaccia (I)

a. Nasal pillow (Disponibile in S, M, L)	b. L'assieme della struttura
c. Supporto	d. Tubo corto
e. Coperchio dell'umidificatore	f. Umidificatore (HU-Plus)
g. Corpo dell'umidificatore	h. Filtro
i. Attacco	j. Connettore a clip (accessorio opzionale)
k. Coperchio del filtro	l. Umidificatore (HU)
m. Copricapo	

Notes: L'HU e l'HU-Plus sono umidificatori senz'acqua. Sono progettati per offrire un maggiore comfort migliorando il livello di umidità nell'aria che respiri e offrendo sollievo dall'eventuale secchezza. L'HU è un buon punto di partenza per trovare il giusto livello di umidificazione. L'HU-Plus migliorerà ulteriormente il livello di umidità ed è utile quando il livello di umidità dell'ambiente è molto basso (es. Alitudini elevate, su un aereo).

Indossare la interfaccia (II)

Notes:

- Prima di indossare l'interfaccia ruotare il corpo dell'umidificatore fino all'apertura. Separare il corpo dell'umidificatore dal coperchio dell'umidificatore come descritto nella sezione 3 di "Smontare la interfaccia". Quindi fare riferimento alla sezione "Rimontare la interfaccia" 3, 4 installare l'umidificatore (HU/HU-Plus) nel coperchio dell'umidificatore e serrare il corpo dell'umidificatore. Dopo aver installato l'umidificatore (HU/HU-Plus), seguire i passaggi seguenti per indossarlo.
- Prima di indossare nuovamente l'interfaccia, fare riferimento alle sezioni "Pulizia della interfaccia a casa" e "Riprocessare la interfaccia tra un paziente e l'altro" per la pulizia e la disinfezione.
- I nasal pillows sono disponibili nelle 3 misure S, M, L. Tenere fermi i pillows nelle narici, assicurandosi che la taglia (per es. M) sia quella adatta.
- Qualora si rilevi una perdita d'aria, regolare nuovamente l'angolazione dei nasal pillows fino ad ottenere una tenuta ottimale. Qualora non fosse possibile eliminare le perdite d'aria, potrebbe essere necessario cambiare la dimensione dei nasal pillows.

- Inserire i due strap laterali della fascia per la testa nei fori del pannello, quindi ripiegarli per fissarli.
- Inserire la fascia per la testa tenendo gli strap laterali e tirando sulla parte posteriore della testa. L'aparte superiore della cinta deve aderire perfettamente alla testa.
- Regolare le due parti laterali della fascia fino a farla aderire perfettamente sotto al naso. Riattaccare le linguette.
- Allontanare la interfaccia dal viso e poi riposizionarla per ottenere il fitting migliore. Confermare la posizione giusta della interfaccia con i nasal pillows inseriti dentro le narici.
- Alla fine collegare il tubo della interfaccia nel tubo deldispositivo. Ora la interfaccia è pronta per l'utilizzo.

Smontare la interfaccia (III)

Nota:

- L'assieme della struttura non va disintegrata.
- Non tirare il tubo corto né il compressore perché ciò

1

